

产品说明书


1. 医用干式胶片使用说明书

(1) 产品名称：医用干式胶片

- (2) 规格型号：
- | | |
|-----------|-------------------------|
| (1) LP-1 | 330mm×420mm |
| (2) LP-2 | 8in×10in (203mm×254mm) |
| (3) LP-3 | 10in×12in (254mm×304mm) |
| (4) LP-4 | 11in×14in (279mm×355mm) |
| (5) LP-5 | A3 |
| (6) LP-6 | A4 |
| (7) BP-1 | 330mm×420mm |
| (8) BP-2 | 8in×10in (203mm×254mm) |
| (9) BP-3 | 10in×12in (254mm×304mm) |
| (10) BP-4 | 11in×14in (279mm×355mm) |
| (11) BP-5 | A3 |
| (12) BP-6 | A4 |

(3) 产品描述:

通常由在透明胶片基的一侧或双侧涂上感光乳剂/感光材料制作而成,用于记录、显示与储存医学影像。

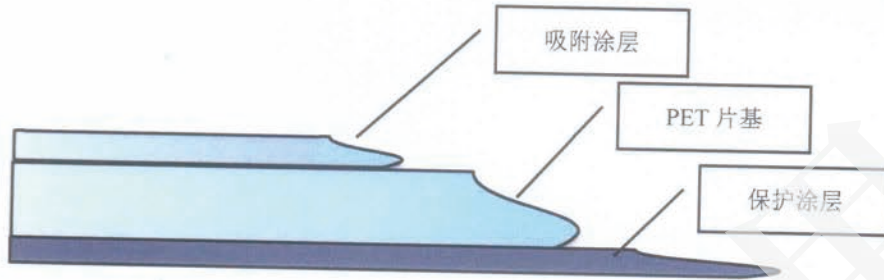

医用干式胶片用于在专用的打印机上打印医学影像,具有图像清晰,易存储,打印效率高,环保等优点。胶片和涂层环保无毒,不产生任何异味和有害气体,并且防水、耐撕,材质硬挺,表面洁白、细滑,适于长期保存。

(4) 产品的性能指标:


项目	单位	要求
外观		医用干式胶片的表面应平整,无明显点子、条道、拉丝、脱涂、涂布不均、折痕、皱纹、孔洞、裂口、油斑、脏迹外观弊病。胶片的切边应光洁、无毛刺。
密度	g/m^2	195 ± 5
厚度	μm	150 ± 5
表面电阻	Ω	$\leq 1 \times 10^{10}$
尺寸偏差	mm	当尺寸 $> 210mm \times 297mm$ 时,尺寸偏差 $\leq \pm 2mm$ 当尺寸 $< 210mm \times 297mm$ 时,尺寸偏差 $\leq \pm 2mm$

(5) 产品的预期用途:

用于 X 射线摄影时记录射线影像图像。

(6) 安装和使用说明或者图示：

胶片放入打印机时，必须注意正反面，正面为图文打印面，反面不能正确的打印出合格影像图文，识别正反面的方法见下图：

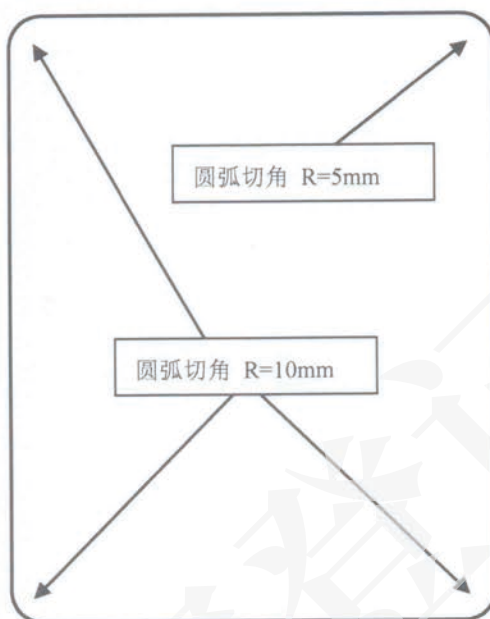

上图为正面（打印面），目视观察切角圆弧的大小和位置来识别胶片的打印面。

(7) 产品维护和保养方法，特殊贮运存放条件、方法：

包装后的医用干式胶片应贮存在环境温度-20℃-45℃之间，相对湿度 5%-85%、无腐蚀性气体、通风良好的室内，并严禁受其他物品挤压。

(8) 注意事项：

胶片运输中要防雨，包装堆叠书不能超过 4 层，搬运时小心轻放；包装破损后须检查医用打印胶片是否损伤，胶片物理表现有明显损伤和变形，即视为报废。

(9) 产品生产日期：见标签

(10) 限期使用的产品的有效期限：

医用干式胶片从产品生产下线日期计算，有效使用期限为 120 个月。

(11) 备案人/生产企业名称：医影联合科技成都有限公司

(12) 注册地址：成都市成华区龙潭总部经济城成宏路 18 号 B 座 8 层 801 室

(13) 联系方式

电话：028-62619465

邮编：610000

(14) 备案凭证编号：

(15) 生产备案凭证编号：

(16) 产品技术要求编号：

(17) 售后服务方式：

售后服务中心联系电话：028-62619465；同时可以与最近的分销商联系。

同样也可向我们发送电子邮件：miut@miut.cn。

(18) 售后服务单位：

医影联合科技成都有限公司售后服务部

地址：成都市成华区龙潭总部经济城成宏路 18 号 B 座 8 层 801 室

电话：028-62619465

邮编：610000

邮件：miut@miut.cn

医影联合科技成都有限公司

2017 年 9 月 5 日